



ePRO

GUIDA PRATICA



Indice

Introduzione	3
<i>Cos'è ePRO?</i>	3
<i>Perché usarlo?</i>	3
<i>Come funziona?</i>	3
In studio	3
A casa	3
Accesso alla piattaforma	3
Uso della piattaforma	5
<i>Utenti</i>	5
<i>Area utente</i>	5
Attività in studio	6
Attività a distanza	7
Profilo	7
Report	8
<i>Esercizi e strumenti</i>	10
Esercizi	11
Strumenti	11
Accesso studente	11
Gestione profilo utente. Rinnovo dell'abbonamento	13

Introduzione

Cos'è ePRO?

ePRO è una piattaforma innovativa per la riabilitazione in studio e a distanza dei bambini con Disturbi Specifici di Apprendimento o altre difficoltà di apprendimento. L'ambiente ePRO propone centinaia di esercizi interattivi per il recupero e il sostegno. Tali materiali sono presentati sotto forma di accattivanti giochi multimediali per favorire la motivazione del bambino stimolandone l'attenzione.

All'interno della piattaforma è presente anche il Tachistoscopio, uno strumento versatile, modulabile e parametrizzabile per la riabilitazione e l'abilitazione della lettura per bambini e ragazzi con dislessia evolutiva e altri Disturbi Specifici dell'Apprendimento, con difficoltà di lettura e di riconoscimento visivo.

Perché usarlo?

ePRO è uno strumento prezioso ed essenziale per logopedisti, psicologi, neuropsichiatri infantili, terapisti e psicoterapeuti. Semplifica il lavoro dei professionisti in studio e la gestione anche a distanza dei bambini, poiché consente di pianificare le attività e tenere monitorato l'andamento degli utenti.

Il servizio rende inoltre più efficace ed efficiente la riabilitazione, grazie a una selezione dei migliori materiali nati dall'esperienza del Centro Studi Erickson, e permette di attivare una nuova modalità d'interazione diretta con la famiglia, attraverso lo svolgimento degli esercizi da parte del bambino a casa e la modulazione delle sessioni di lavoro a seconda della necessità.

Come funziona?

In studio

Gli esercizi possono essere somministrati in formato multimediale, organizzati in una struttura facilmente consultabile, suddivisa in abilità e processi.

Il professionista potrà verificare l'andamento delle prestazioni del bambino e pianificare il lavoro a casa, selezionando specifici materiali.

A casa


Il bambino potrà accedere alla piattaforma con l'account personale fornito dal professionista in modo da svolgere gli esercizi in modo semplice ed efficace.

Sarà possibile verificare in ogni momento il lavoro svolto dal bambino, pianificando in base all'andamento altre attività formative in studio o a casa.


Accesso alla piattaforma

La piattaforma è accessibile al link <https://epro.erickson.it/>. Se si è già registrati si può procedere con il login, altrimenti si deve cliccare il tasto «Attiva il servizio».

Questa procedura va seguita solo per la prima attivazione; i rinnovi successivi dovranno essere effettuati dall'interno della piattaforma.

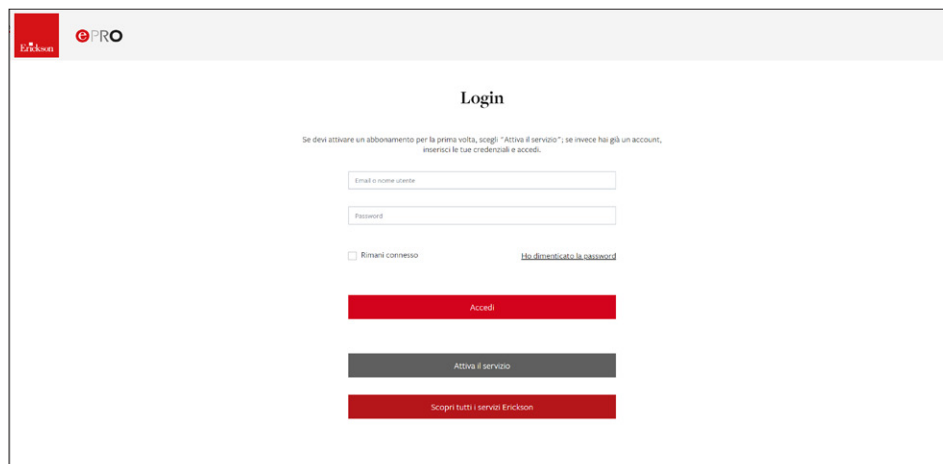

The screenshot shows the 'Login' page of the EPRO platform. At the top left is the Erickson logo and 'EPRO'. The main heading is 'Login'. Below it, a message states: 'Se devi attivare un abbonamento per la prima volta, scegli "Attiva il servizio", se invece hai già un account, inserisci le tue credenziali e accedi.' There are two input fields: 'Email o nome utente' and 'Password'. Below these is a checkbox for 'Rimani connesso' and a link 'Ho dimenticato la password'. At the bottom, there are three buttons: a red 'Accedi' button, a grey 'Attiva il servizio' button, and a red 'Scopri tutti i servizi Erickson' button.

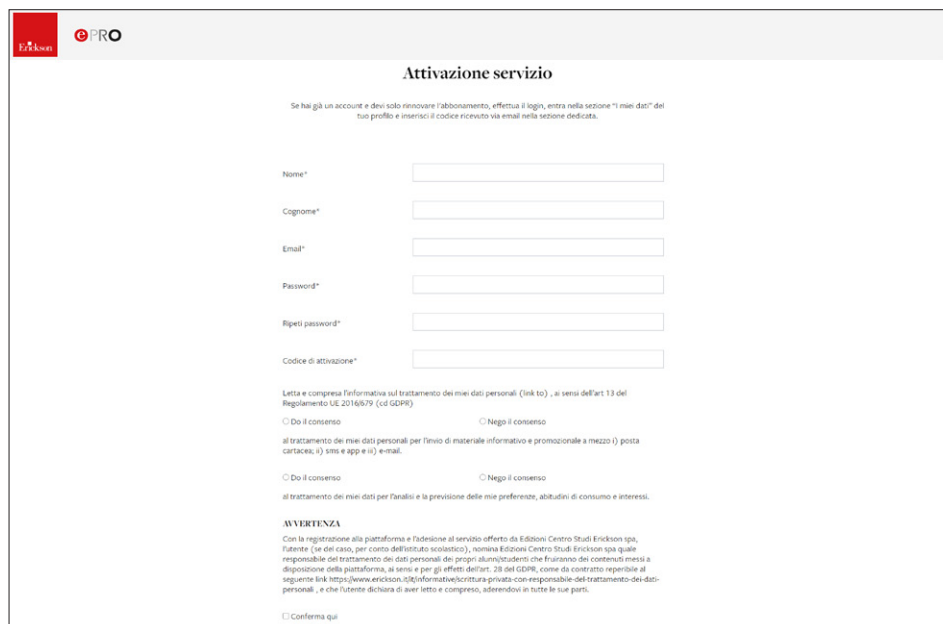


The screenshot shows the 'Attivazione servizio' page. At the top left is the Erickson logo and 'EPRO'. The main heading is 'Attivazione servizio'. Below it, a message states: 'Se hai già un account e devi solo rinnovare l'abbonamento, effettua il login, entra nella sezione "I miei dati" del tuo profilo e inserisci il codice ricevuto via email nella sezione dedicata.' There are six input fields: 'Nome*', 'Cognome*', 'Email*', 'Password*', 'Ripeti password*', and 'Codice di attivazione*'. Below the fields are two consent sections. The first section is for 'il trattamento dei miei dati personali per l'invio di materiale informativo e promozionale a mezzo i) posta cartacea; ii) sms e app e iii) e-mail.' with radio buttons for 'Do il consenso' and 'Nego il consenso'. The second section is for 'il trattamento dei miei dati per l'analisi e la previsione delle mie preferenze, abitudini di consumo e interessi.' with radio buttons for 'Do il consenso' and 'Nego il consenso'. At the bottom, there is an 'AVVERTENZA' section with a warning about data processing and a 'Conferma qui' checkbox.

Uso della piattaforma

Utenti


Effettuato il login, viene visualizzata la pagina dove è possibile iniziare a creare il proprio database di utenti. La lista di utenti è presentata in ordine alfabetico; tramite la barra di ricerca può essere effettuata una ricerca per nome o per cognome.

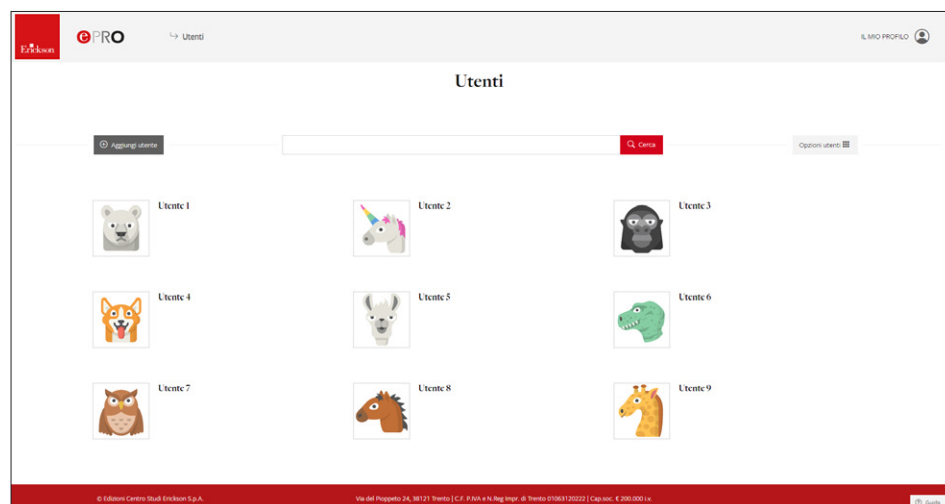

Per creare un nuovo profilo utente è sufficiente cliccare sul pulsante «Aggiungi utente». Si aprirà una scheda dove inserire il nome, il cognome e alcune note aggiuntive.

Lo username verrà invece assegnato direttamente dalla piattaforma, così come l'avatar del bambino, che potrà essere però sostituito con un altro a scelta tra quelli proposti dal sistema.

Sarà sempre possibile modificare l'anagrafica dell'utente entrando nella sua area utente.

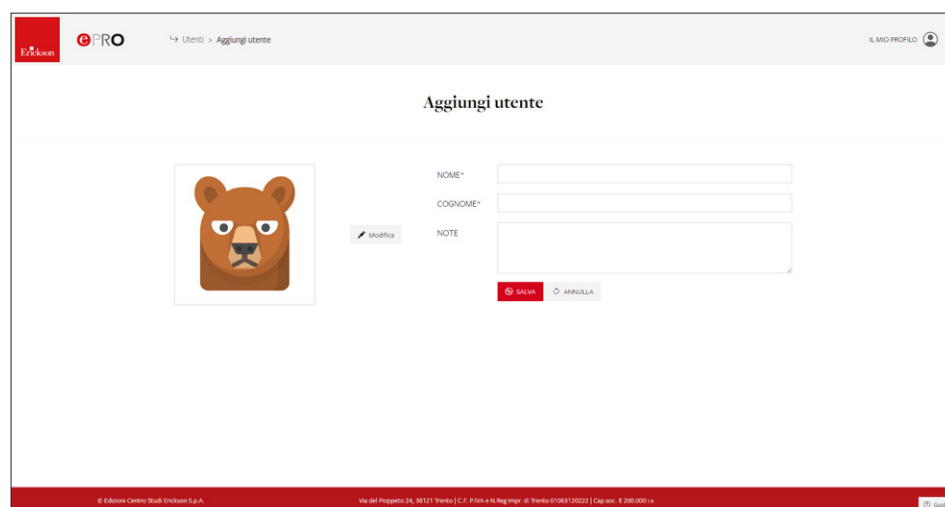

Area utente

Dopo aver selezionato un utente o averne inserito uno nuovo, si accede alla sua area. Nella fascetta grigia in alto si può vedere in ogni momento per quale soggetto si sta lavorando.

In qualsiasi dei tab appartenenti a quest'area ci si trovi, sarà sempre possibile stampare i dati di accesso del singolo utente cliccando «Opzioni utente > Stampa dati di accesso».

Attività in studio

In questa sezione sono inserite tutte le attività previste per quel bambino in ordine cronologico inverso. Cliccando «Nuova attività» verranno richieste la data, l'ora ed eventuali note.

NUOVA ATTIVITÀ ✕

Data * 📅

Dalle * 🕒 alle * 🕒

Note




✔ Salva e assegna esercizi

Dopo aver impostato i dati dell'attività, si possono aggiungere gli esercizi multimediali cliccando «Assegna esercizi». Sarà anche possibile eliminarla oppure modificare i dati precedentemente inseriti.

Utente I

ATTIVITÀ IN STUDIO
ATTIVITÀ A DISTANZA
PROFILI
REPORT

29/07/2021 - dalle 14:00 alle 15:00

Scambio di grafemi FV - Riconoscimento fonema F
Luciano Fontana 2017 e tutti i diritti
 Clicca "SI" se la parola contiene il suono F; clicca "NO" se la parola non contiene il suono F

Scrittura dei nomi delle figure
Luciano Fontana 2017 e tutti i diritti
 Inserisci nelle caselle il nome della figura che vedi

Tachistoscopio sillabe

Assegna esercizi
Modifica attività
Elimina attività

Al passaggio del mouse sugli esercizi appariranno i pulsanti che permettono di eliminarli dall'attività o spostarli in base all'ordine in cui farli visualizzare agli utenti. Se all'interno delle attività sono stati inseriti degli esercizi sul Tachistoscopio, sarà possibile impostare i vari parametri dello strumento.

Tachistoscopio Parole




Configura
Sposta
Elimina

Nel momento in cui si vuole lavorare in studio con il bambino su una specifica attività, sarà sufficiente cliccare sull'icona dell'esercizio scelto per farlo partire.

Attività a distanza

Questa sezione è simile alla precedente e mostra le eventuali attività da svolgere a casa assegnate al bambino. Cliccando «Nuova attività», alla voce Periodo, il professionista può scegliere se programmare le attività giorno per giorno o se optare per un periodo di tempo più esteso entro il quale far svolgere le attività.

Qui può anche impostare un limite di tempo di uso quotidiano per aiutare il bambino a gestire al meglio il carico di lavoro.

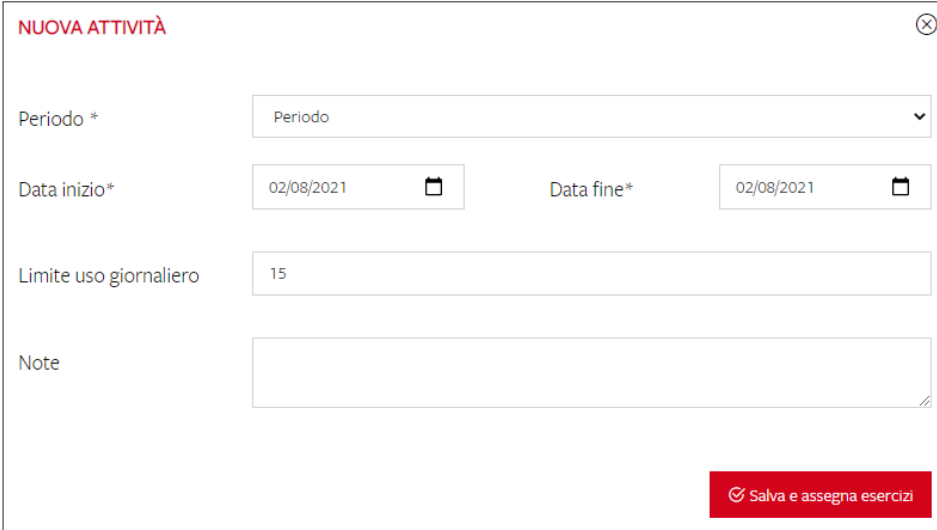


The screenshot shows a form titled "NUOVA ATTIVITÀ" with a close button in the top right corner. The form contains the following fields:

- Periodo ***: A dropdown menu currently showing "Periodo".
- Data inizio***: A date field with the value "02/08/2021" and a calendar icon.
- Data fine***: A date field with the value "02/08/2021" and a calendar icon.
- Limite uso giornaliero**: A text input field containing the number "15".
- Note**: A large empty text area for additional information.

A red button with a checkmark icon and the text "Salva e assegna esercizi" is located at the bottom right of the form.

Dopo aver impostato i dati dell'attività, si possono aggiungere gli esercizi multimediali cliccando «Assegna esercizi». Sarà anche possibile eliminarla oppure modificare i dati precedentemente inseriti.

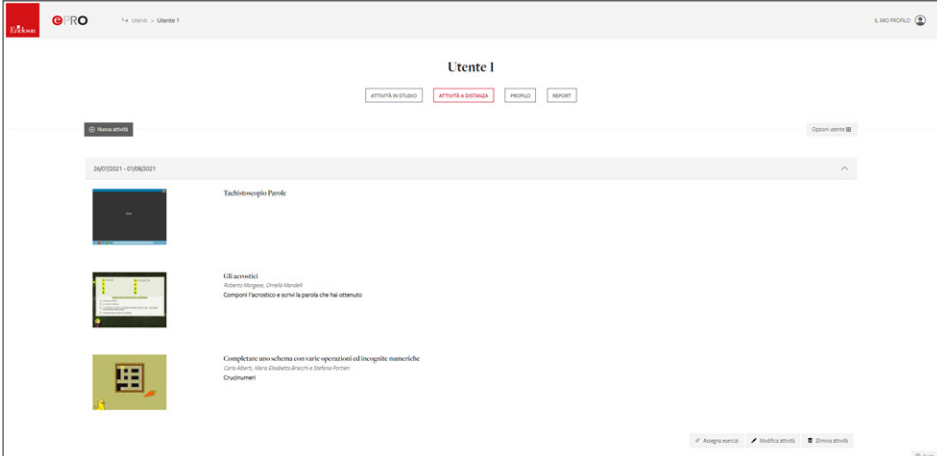

The screenshot displays the user profile page for "Utente 1". At the top, there are navigation buttons: "attività in studio", "attività a distanza" (highlighted in red), "profilo", and "segni". Below this, there is a section titled "Tachistoscopio Paralelo" with a date range "26/07/2021 - 01/08/2021". This section contains three exercise cards:


- K88.acrivedi**: "Riscaldamento: Crono-Paralelo" with the description "Componi l'acrobatico e scrivi la parola che hai ottenuto".
- Completare una richiesta con varie operazioni ed incognite numeriche**: "Crono-Paralelo: Riscaldamento: Crono-Paralelo" with the description "Completare".

At the bottom right of the page, there are three buttons: "Assegna esercizi", "Modifica attività", and "Elimina attività".

Come per le attività in studio, sarà possibile eliminare gli esercizi dall'attività o spostarli in base all'ordine in cui farli visualizzare agli utenti. Se all'interno delle attività sono stati inseriti degli esercizi sul Tachistoscopio, si possono impostare i vari parametri dello strumento.

Profilo


In questa sezione si possono modificare i dati dell'utente o, all'occorrenza, eliminarlo dal sistema cliccando «Opzioni utente > Elimina utente».

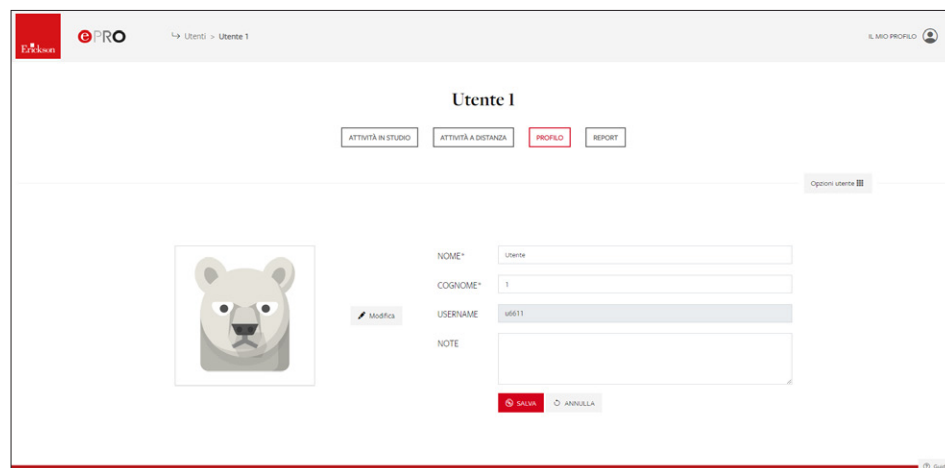

Report

In questa pagina il professionista può vedere passo passo l'andamento dell'utente selezionato, avere un riepilogo delle attività svolte sia in studio che a casa e disporre di un report puntuale per ogni materiale utilizzato (esercizi multimediali e Tachistoscopio).

Accedendo a tale sezione si visualizza come prima cosa un grafico che riporta, per ogni seduta, le percentuali di correttezza ottenute dall'utente, raggruppate in base ai processi di apprendimento sottostanti, visualizzati in colori differenti. Spuntando la casellina a fianco di ciascun ambito, si sceglie se rappresentare o meno sul grafico quella specifica voce. Il grafico permette, quindi, di avere subito un'idea di dove ci siano stati dei miglioramenti e in quale area persistano invece delle difficoltà.

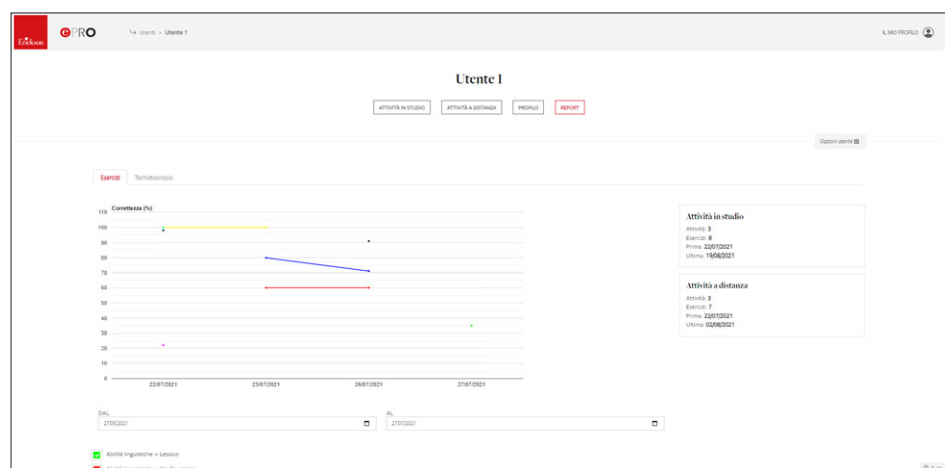


Di default il programma mostra l'andamento delle attività svolte dal bambino negli ultimi due mesi ma, cliccando sull'icona del calendario vicino alle date, è possibile visualizzare sul grafico un arco temporale diverso (dell'ampiezza massima di un anno).


Di fianco al grafico ci sono alcune informazioni riepilogative sulle attività in studio e a distanza mentre al di sotto di esso sono riportate tutte le attività svolte dal bambino.

- Abilità linguistiche » Lessico
- Abilità linguistiche » Morfo-sintassi
- Letto-scrittura » Comprensione » Parole
- Letto-scrittura » Comprensione » Parole » Complesse
- Matematica » Calcolo » Calcolo a mente » Entro il 100
- Matematica » Calcolo » Calcolo a mente » Strategie metacognitive e principi (es. strategie di calcolo a mente, le proprietà)
- Metafonologia » Profonda » Fonema » Identificazione Fonema Iniziale/Interno/Finale


Lista delle attività



Scrittura di parole
Luciana Ferracanechi e Nadia Meini
Clicca sul gramofono e scrivi nelle caselle le parole che senti





Completare uno schema con varie operazioni ed incognite numeriche
Carla Alberti, Maria Elisabetta Braschi e Stefania Fortini
Cruciverba




Scambio di grafemi F e V - Riconoscimento fonema F
Luciana Ferracanechi e Nadia Meini
Ascolta le istruzioni e risolvi gli esercizi

Cliccando ogni esercizio sarà possibile accedere al report dettagliato: si vedranno le date di svolgimento dell'esercizio, il numero di videate svolte sul totale, il tempo di svolgimento in secondi e la percentuale di correttezza di ogni tentativo.



Utenti > Utente 1
IL MIO PROFILO

Utente 1

ATTIVITÀ IN STUDIO
ATTIVITÀ A DISTANZA
PROFILO
REPORT





Scrittura di parole
Luciana Ferracanechi e Nadia Meini
Clicca sul gramofono e scrivi nelle caselle le parole che senti

DATA	N. VIDEATE SUL TOTALE	TEMPO	% DI CORRETTEZZA
22/07/2021 14:27	20/20	125,044 sec	100 %
23/07/2021 10:54	20/20	86,408 sec	100 %

© Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
Via del Pioppeto 24, 38121 Trento (C.A. P.IVA n. 04569710202) Capoverdi, € 200.000 i.v.
Stato


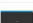
In alto nella schermata iniziale della sezione «Report» si può scegliere se vedere i report degli esercizi o quelli relativi allo strumento Tachistoscopio.



Utenti > Utente 1
IL MIO PROFILO

Utente 1

ATTIVITÀ IN STUDIO
ATTIVITÀ A DISTANZA
PROFILO
REPORT

Esercizi
Tachistoscopio

Strumento	Svolgimento	Correttezza	Esposizione	Intervallo
 Tachistoscopio Parole [+ dettagli]	27/07/2021 09:14	88%	0,5	100 cent./sec.
 Tachistoscopio Parole [+ dettagli]	22/07/2021 14:27	84%	0,5	100 cent./sec.



Entrando nel tab del Tachistoscopio si vedrà una tabella che mostra nel dettaglio quale esercizio è stato svolto, la data e l'ora di svolgimento, la percentuale di correttezza, l'esposizione e l'intervallo. Per visualizzare i dati di configurazione del Tachistoscopio basta cliccare «+ dettagli».


All'interno delle «Opzioni utente» a lato sarà possibile visualizzare per quanti minuti il bambino ha utilizzato la piattaforma a distanza ed esportare tutti i report elaborati.

Esercizi e strumenti

Come detto in precedenza, il professionista può assegnare delle attività sia in studio che a distanza. Le attività sono divise in due categorie: esercizi e strumenti, organizzate in una struttura facilmente consultabile. È possibile trovare i materiali più adeguati sfruttando due modalità di ricerca:

- navigazione libera: si inserisce una parola chiave nel campo di ricerca per visualizzare solo il materiale attinente alla parola inserita;
- navigazione guidata: utilizzando i vari filtri si può selezionare il materiale più consono alle proprie esigenze.

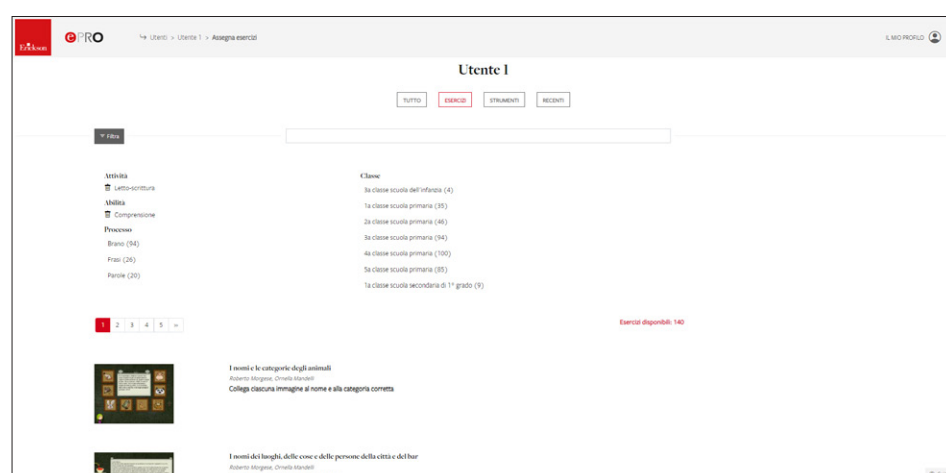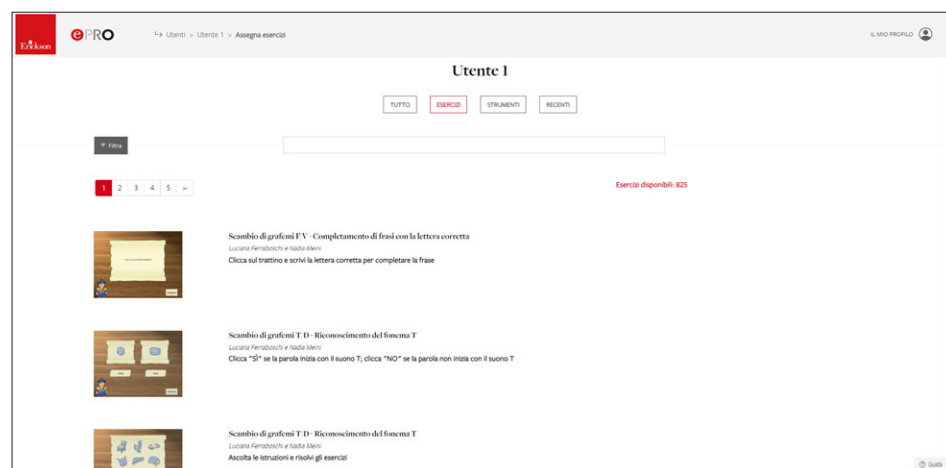

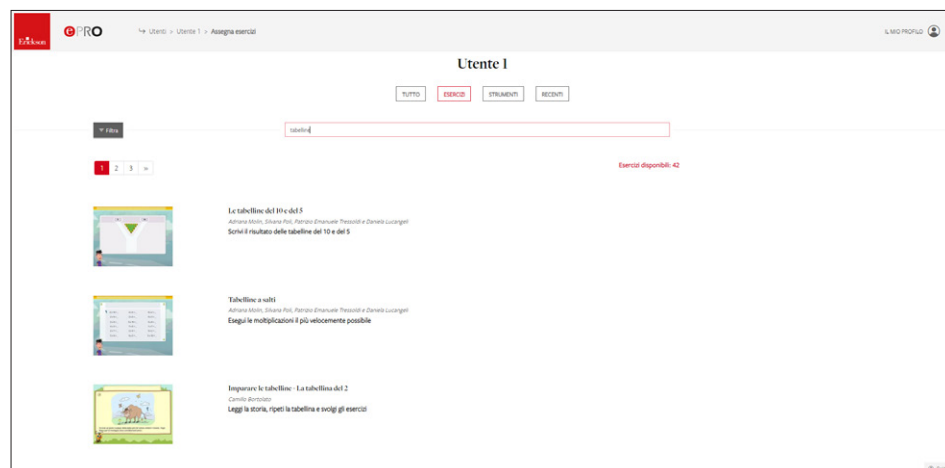


Esercizi

Questa sezione contiene tutti gli esercizi interattivi assegnabili agli utenti. Per ognuno sono indicati il titolo e gli autori. Cliccando il tasto «Assegna» esso verrà assegnato alle attività in studio o a distanza, in base alla sezione da cui si proviene. È possibile vedere un'anteprima dell'esercizio e provarlo; per farlo è sufficiente cliccare l'immagine.

Strumenti

Questa sezione contiene tutti gli esercizi sul Tachistoscopo. Anche in questo caso cliccando sull'immagine si può provare l'esercizio. Le configurazioni dello strumento, come detto in precedenza, verranno effettuate nella sezione delle attività cliccando il tasto «Configura».

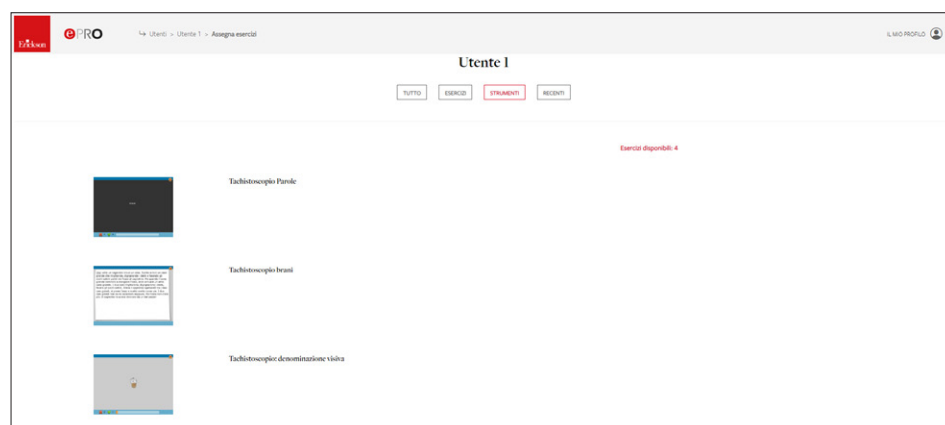

Accesso studente

Per accedere a ePRO a distanza, è necessario comunicare agli utenti le credenziali di accesso.

Per stamparle bisognerà accedere alla sua pagina e cliccare il relativo pulsante. Ogni qual volta si cliccherà su questo pulsante verrà rigenerata la password, che andrà quindi di volta in volta comunicata all'utente. È perciò opportuno svolgere tale operazione solo in caso di necessità, ad esempio nel caso di smarrimento della password da parte del bambino.




Una volta ottenute le credenziali anche il bambino, per accedere a ePRO dovrà scaricare l'apposito applicativo ed effettuare il login.


Troverà quindi una schermata con l'elenco degli esercizi previsti per il giorno in cui accede presentati in base all'ordine scelto dal professionista. Per svolgerli, dovrà semplicemente cliccarvi sopra.

Sopra alla lista degli esercizi è presente la data o il periodo entro cui il bambino deve svolgere le attività e una barra di progressione che mostra i minuti di utilizzo rispetto al totale indicato dal professionista.

L'ordine di svolgimento sarà libero e non dipenderà quindi dall'ordine di presentazione degli esercizi.

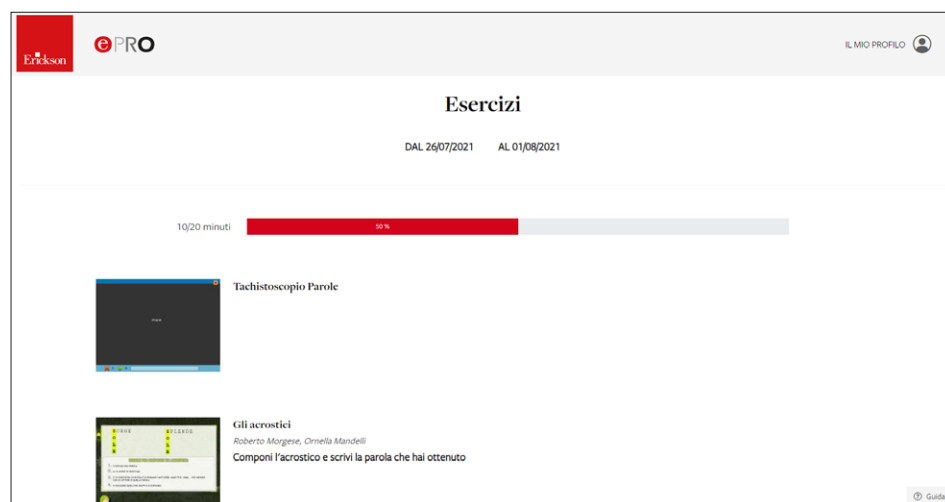

Nella sezione «I miei dati», a cui si accede dal menu a tendina che appare cliccando «Il mio profilo», il bambino potrà cambiare in autonomia il proprio avatar scegliendo tra quelli proposti dalla piattaforma.

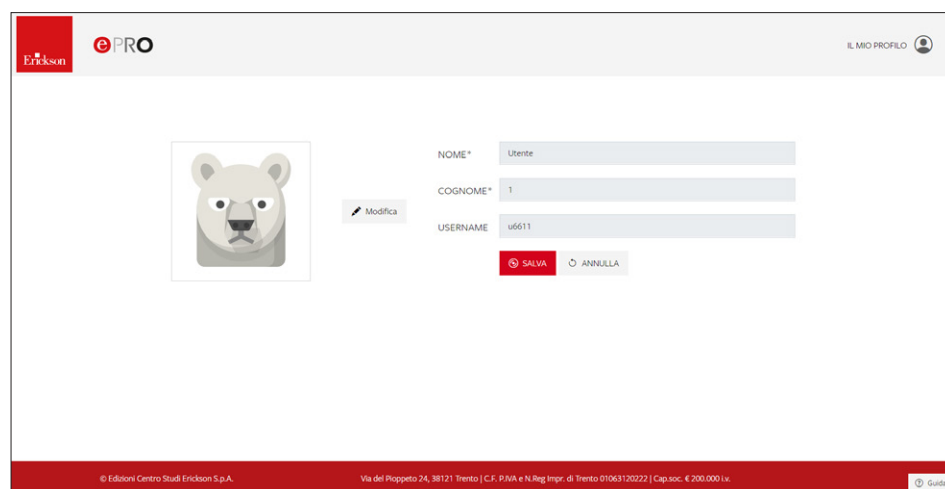

Gestione profilo utente. Rinnovo dell'abbonamento

Se un utente è già registrato alla piattaforma e ha solo bisogno di rinnovare l'abbonamento, deve scegliere nel menu a tendina che appare cliccando «Il mio profilo» la voce «I miei dati». In questa sezione si possono modificare i propri dati personali e la password. Saranno inoltre presenti delle informazioni sull'abbonamento in essere (tipo, validità ed eventuali ore aggiuntive a distanza) e, cliccando sul pulsante «Rinnova l'abbonamento», apparirà il campo in cui inserire il codice.

ERICKSON PRO

↳ Studenti e classi > I miei dati

IL MIO PROFILO

I miei dati

NAME* Martina

COGNOME* Panzani

EMAIL martinapanzani@erickson.com

MODIFICA

INFORMAZIONI SULL' ABBONAMENTO

Tipo di abbonamento: Esercizi + Tachistoscopio - 6 mesi

Validità: 22/07/2021 - 22/01/2022

Accesso a distanza - Tempo rimanente: 140 minuti

Rinnova l'abbonamento

© Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. Via del Pioppeto 24, 38121 Trento | C.F. P.A.A. n. Reg. imp. di Trento 0106170222 | Cap. soc. € 200.000 i.v.

La ricarica verrà registrata all'interno del proprio account e sarà possibile continuare a lavorare sui medesimi utenti.

Se l'abbonamento è prossimo alla scadenza, ciò verrà segnalato da un *alert*.